

## INSTRUCCIONES DE USO EQUIPO FM

El alumno tiene un implante Freedom BTE en un oído y un implante Nucleus 5 serie C en el otro, por lo que los receptores de FM son distintos para cada prótesis auditiva.

Se recomienda apagar ambos implantes para conectar el receptor de FM y luego encenderlos.

- **Implante Freedom BTE**

Para poder conectar el receptor de FM en este implante debe hacerse lo siguiente :



1. Apagar el implante pulsando el botón superior de la pantalla durante 3 segundos. El led parpadeará y se apagará y no habrá nada en la pantalla.
2. Quitar el portapilas del implante apartando previamente el protector.
3. Sustituir este portapilas por el receptor FM que tiene ya un portapilas incorporado.
4. Encender el implante pulsando en el mismo botón y de la misma forma que cuando se apagó. El número de veces que parpadee el led indicará el programa en el que está el implante.



MicroLink FM Receiver

- **Implante Nucleus 5**

Al igual que con el otro implante, deben seguirse una serie de pasos :



1. Apagar el implante pulsando el botón 3 segundos.
2. Levantar la pestaña situada debajo del cable de la antena.
3. Colocar y conectar en esa entrada el receptor de FM
4. Encender el implante pulsando el mismo botón y de la misma forma que cuando se apagó.



Una vez preparados los implantes se deberá encender la emisora de FM y sincronizarla con cada una de las prótesis auditivas colocándola a unos 20cm o menos de cada una, hasta que aparezca el mensaje en la pantalla “Se han identificado/sincronizado los receptores” y después en la pantalla: “H47”.



Para ello se debe presionar el botón situado debajo de “Sync” que aparece en la pantalla. Luego el botón situado debajo de “Monitor”. Para el lado del implante Nucleus 5 aparecerá: “ML14i ✓”, pero en el caso del lado del implante Freedom aparecerá un mensaje como si no se estuviera detectando el receptor aunque el alumno oirá a través de ese implante un pitido que confirma que está activado.

Para enmudecer el emisor sin necesidad de apagarlo, pulsar el botón superior central.

Para bloquear el teclado, pulsar el botón con símbolo de llave seguido del botón OK.